



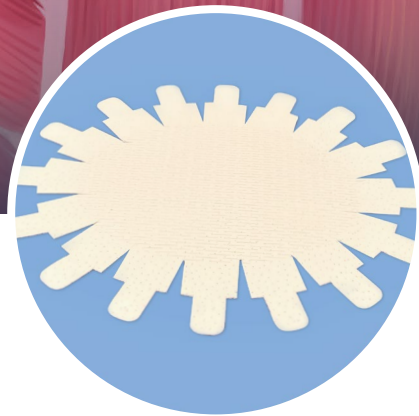

cellis<sup>®</sup> **Breast**

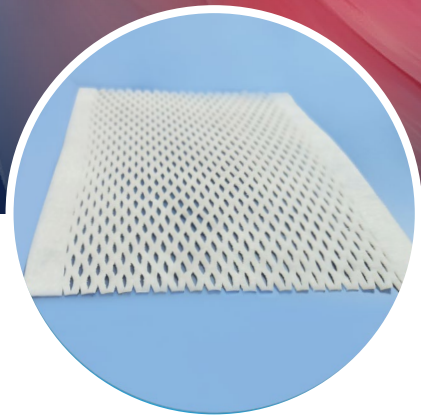

MATRICE DERMIQUE ACELLULAIRE  
**POUR LA RECONSTRUCTION  
MAMMAIRE**

# La régénération tissulaire au service de la reconstruction mammaire

MECCELLIS BIOTECH est une entreprise internationale reconnue experte en ingénierie cellulaire. Elle s'emploie à certifier des dispositifs médicaux de haute qualité afin que les professionnels de santé puissent prodiguer les meilleurs soins possibles à leurs patients.


MECCELLIS BIOTECH a développé et commercialisé une nouvelle gamme de matrices dermiques pour le renforcement de tissus mous. Indiquée pour la reconstruction mammaire, CELLIS® Breast est une matrice dermique d'origine porcine.



## RECONSTRUCTION MAMMAIRE RÉTRO OU PRÉ-PECTORALE

### LES + CELLIS® BREAST

- + Matrice meshée et extensible pour recouvrir tous types de prothèses mammaires avec un minimum de matière
- + Bordures pour une fixation facilitée et sécurisée
- + Lyophilisée et exempte d'agent de conservation

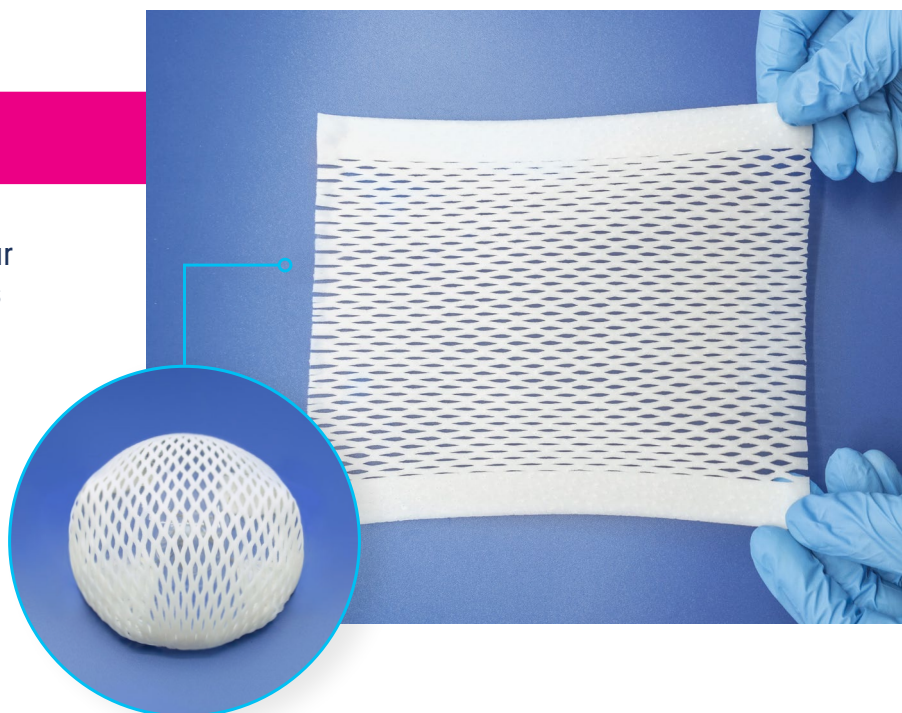

(A)






(B)

TAILLES (A)	TAILLES APRÈS HYDRATATION ET EXTENSION (B)	RÉFÉRENCES	ÉPAISSEURS
10 x 20 cm	19 x 20 cm	CB1020MF	0,9 mm
12 x 18 cm	21 x 18 cm	CB1218MF	0,9 mm

## RECONSTRUCTION MAMMAIRE RÉTRO OU PRÉ-PECTORALE

### LES + CELLIS<sup>®</sup> BREAST

- + Forme adaptée pour un rendu esthétique naturel
- + Matrice meshée et extensible pour recouvrir tous types de prothèses mammaires avec un minimum de matière
- + Préparation rapide du dispositif afin d'éviter tous risques de contamination
- + Lyophilisée et exempte d'agent de conservation

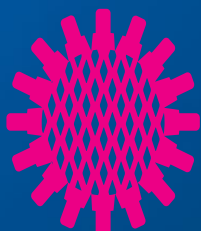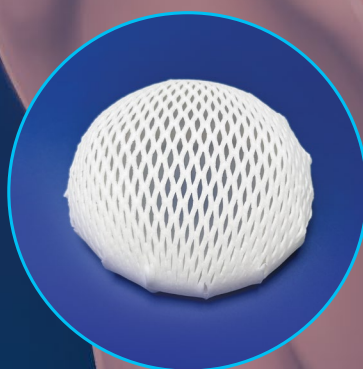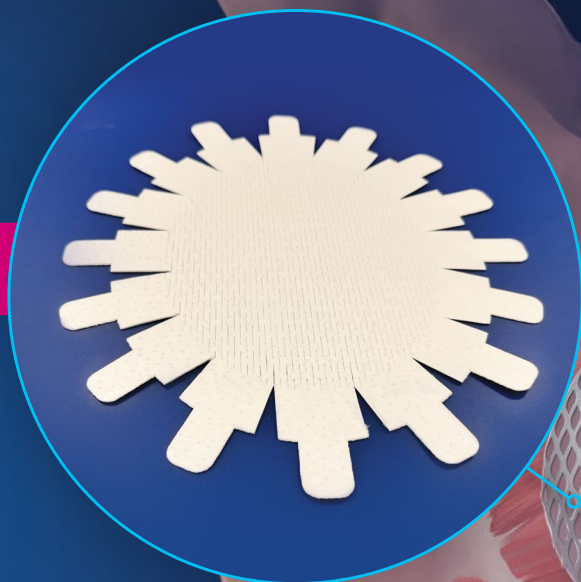

TAILLES	RÉFÉRENCES	ÉPAISSEURS
19 x 23 cm	CB1923MF	0,9 mm
21 x 24 cm	CB2124MF	0,9 mm

## DESCRIPTION DU PRODUIT

CELLIS® Breast est une matrice de collagène porcine exempte de cellules et non pyrogène (matrice dermique acellulaire ADM) élaborée à partir de derme porcin. CELLIS® Breast est destinée à être utilisée comme matrice pour les réparations de tissus mous et sert de soutien, recouvrement et remplacement de tissus. CELLIS® Breast est disponible en différentes tailles et formes. CELLIS® Breast se présente sous forme lyophilisée en double emballage stérile. Elle ne contient pas d'agent conservateur. La matrice est un implant résistant et biocompatible qui s'intègre dans le tissu du receveur par infiltration cellulaire et microvasculaire, et ne devrait pas nécessiter de procédure chirurgicale d'ablation.

## COMPOSITION

Matrice de collagène acellulaire porcine stérile, type I & III, avec une teneur en collagène d'environ 0,035 à 0,085 g/cm<sup>2</sup>.

## DESTINATION ET INDICATION

CELLIS® Breast est destinée à être implantée pour renforcer les tissus mous fragilisés et pour la réparation chirurgicale de membranes tissulaires abîmées ou déchirées.

Elle est indiquée pour la reconstruction, la restauration et la régénération des tissus mous et conjonctifs humains notamment lors d'une perte de tissu et en tant que tissu de maintien lors de procédures chirurgicales telle que la reconstruction mammaire.

CELLIS® Breast est indiquée à être utilisée pour les reconstructions mammaires après mastectomie.

## CONTRE-INDICATIONS

CELLIS® Breast ne doit pas être utilisée chez les patients de moins de 18 ans.

La matrice est d'origine porcine et ne doit pas être utilisée pour des patients souffrant d'une hypersensibilité connue aux matériaux d'origine porcine. Il n'existe aucune étude sur l'utilisation de CELLIS® Breast pendant la grossesse et l'allaitement. CELLIS® Breast ne doit pas être utilisée pendant la grossesse et l'allaitement.

## STOCKAGE

- Conserver à une température maximale de 25°C comme indiqué sur l'étiquette.
- Tenir à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Stocker dans l'emballage d'origine.

Les informations inscrites sur cette plaquette sont destinées exclusivement aux professionnels de santé.  
Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation.

Nous vous invitons à consulter notre site

[www.meccellis.com](http://www.meccellis.com)

et à contacter votre commercial pour toutes informations complémentaires.



**MECCELLIS BIOTECH**

75, rue de Québec  
17000 La Rochelle  
FRANCE

Tél. : +33 (0)5 17 81 07 63

[contact@meccellis.com](mailto:contact@meccellis.com)  
[www.meccellis.com](http://www.meccellis.com)

 **meccellis**  
biotech

Distribuée par :