

## Matrice dermique acellulaire pour la reconstruction de tissus mous

### DESCRIPTION DU PRODUIT

CELLIS<sup>®</sup> Dental est une matrice de collagène porcine exempte de cellules et non pyrogène (matrice dermique acellulaire ADM) élaborée à partir de derme porcine. CELLIS<sup>®</sup> Dental est destinée à être utilisée comme membrane chirurgicale pour les réparations de tissus mous et sert de soutien, recouvrement et remplacement de tissus. CELLIS<sup>®</sup> Dental se présente sous forme lyophilisée en double emballage stérile. Elle ne contient pas d'agent conservateur. La membrane chirurgicale est un implant résistant et biocompatible qui s'intègre dans le tissu du receveur par infiltration cellulaire et microvasculaire, et ne devrait pas nécessiter de procédure chirurgicale d'ablation.

### COMPOSITION

Matrice de collagène acellulaire porcine stérile, type I & III.

### INDICATIONS

CELLIS<sup>®</sup> Dental est un dispositif médical de Classe III dédié à la chirurgie dentaire. Il est destiné à être utilisé en implantologie, parodontologie, stomatologie & CMF (chirurgie cranio-maxillo-faciale) pour la régénération dentaire de tissus mous malformés et la formation de tissus mous autour des dents ou des implants. Les indications d'utilisation comprennent :

- Traitement des défauts de récession (récession gingivale)
- Augmentation des tissus mous autour des dents et des implants
- Greffe de tissus mous en combinaison avec ROG/RTG
- Recouvrement/fermeture des alvéoles d'extraction


### CONTRE-INDICATIONS

CELLIS<sup>®</sup> Dental ne doit pas être utilisé sur les patients atteints :

- D'une hypersensibilité ou allergie connue aux matériaux d'origine porcine
- D'une infection ou inflammation aiguë ou chronique de la cavité buccale
- D'une maladie générale contre-indiquant l'implantologie, la parodontologie, la stomatologie, la chirurgie cranio-maxillo-faciale

### RÉFÉRENCES PRODUITS

TAILLES	RÉFÉRENCES	EPAISSEURS	TAILLES	RÉFÉRENCES	EPAISSEURS
10 X 10 MM	NP1010E	1,4MM	20 X 50 MM	NP2050E	1,4MM
10 X 30 MM	NP1030E	1,4 MM	30 X 40 MM	NP3040E	1,4MM
15 X 20 MM	NP1520E	1,4MM	50 X 50 MM	NP5050E	1,4MM
20 X 30 MM	NP2030E	1,4MM			

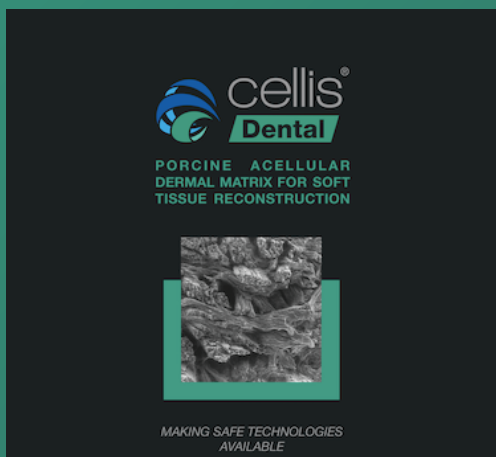

## LES PLUS CELLIS<sup>®</sup>



- Hydratation rapide
- Facilité d'utilisation et de positionnement
- Lyophilisée
- Exempt d'agent de conservation



### Stockage

- Conserver à température ambiante comme indiqué sur l'étiquette
- Tenir à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil
- Stocker dans l'emballage d'origine

### Contact

#### MECELLIS BIOTECH

Adresse : 75 rue de Québec

17000 La Rochelle - France

Tél : +33 (0) 5 17 81 07 63

Email : [contact@meccellis.com](mailto:contact@meccellis.com)

Website : [www.meccellis.com](http://www.meccellis.com)

Les informations inscrites sont destinées exclusivement aux professionnels de santé. Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation.